

# Betriebsanweisung

Datum:

Unterschrift:

## ANWENDUNGSBEREICH

### Schutz vor Einatmen luftgetragener Partikel, Tröpfchen und Aerosole

(außerhalb des medizinischen Bereichs)

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Eine dicht sitzende FFP2-Maske stellt nach aktueller Auffassung im Rahmen der aktuellen Pandemiesituation einen geeigneten Schutz vor infektiösen Aerosolen, einschließlich Viren, dar. Masken ohne Ausatemventil, die es in allen Geräteklassen gibt, dienen zudem auch dem Schutz Dritter, da nicht nur die Einatemluft, sondern auch die Ausatemluft wirksam gefiltert wird.



## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

### Anlegen der FFP2-Maske

- Hände gründlich waschen oder desinfizieren
- Vor der Benutzung Mundschutz auf augenscheinliche Mängel prüfen
- Mundschutz ggf. mit Namen auf der Außenseite beschriften
- Maske so aufsetzen, dass der Nasenbügel oben ist und die Maske Nase, Mund und Kinn bedeckt
- Das obere Halteband über den Ohren platzieren und das untere im Nacken
- Beide Bänder sollen flach anliegen und nicht verdreht sein
- Nasenbügel an die Form der Nase anpassen
- Die Maske muss möglichst dicht am Gesicht anliegen
- Achtung: Bei Barträgern kann der Dichtsitz der Maske beeinflusst sein
- Hände gründlich waschen oder desinfizieren



### Ablegen der FFP2-Maske

- Hände gründlich waschen oder desinfizieren
- Berührung der Außenseite der Maske vermeiden
- Maske nur an den Haltebändern anfassen
- Bänder lösen oder über den Kopf führen (erst oben, dann unten) und Maske absetzen
- Bei Wiederverwendung den Atemschutz gut austrocknen lassen
- Mutmaßlich kontaminierter Atemschutz ist zu entsorgen
- Hände gründlich waschen oder desinfizieren



### Empfohlene maximale Tragedauer

- Bei leichten Tätigkeiten: 112 Minuten
- Bei mittelschweren Tätigkeiten: 75 Minuten
- Bei schweren Tätigkeiten: 52 Minuten
- Danach Tragepause (keine Arbeitspause): 30 Minuten

### Maximale Nutzungsdauer

- Die FFP2 Maske ist nach jeder Schicht / jedem Tag zu wechseln
- Oder eher bei Durchfeuchtung, Beschädigung, Beschmutzung



Bildquelle: Robert-Koch-Institut

### Arbeitsmedizinische Vorsorge

- Für das Tragen von FFP2-Masken besteht das Angebot für arbeitsmedizinische Vorsorge beim Betriebsarzt

## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Die FFP2-Masken können jederzeit abgesetzt werden; es ist darauf zu achten, dann einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten
- Defekte FFP2-Masken sind sofort der Benutzung zu entziehen

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE

- Als Erste-Hilfe-Fall ist eine psychische Reaktion denkbar. Dann die Maske absetzen, betroffene Person beruhigen; ggf. betrieblichen Ersthelfer benachrichtigen.



## INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG

- Eine Instandhaltung ist nicht vorgesehen. Wiederkehrende Prüfungen sind – abgesehen von der Sichtprüfung beim Aufsetzen – nicht vorgesehen. Bei Beschädigungen ist der Atemschutz auszutauschen. Entsorgung erfolgt über den normalen Haus- bzw. Industriemüll.

Diese Hinweise gelten nicht für den medizinischen Bereich und nicht für das Tragen von Atemschutz Gruppe 1 im Umgang mit SARS-CoV-2-infizierten Personen!